



## **CSCQ Ringversuch zur 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung**

### **Anleitung für Sysmex SF-3000**

Um eine korrekte 5 Leukozyten-Subpopulationen Bestimmung zu erhalten, bitten wir Sie diese Anleitung zu befolgen:

1. Einstellung am Sysmex SF-3000 Gerät:
  - a. „Manual Mode“ wählen
  - b. „QC“ und z.B. „12“ (=freies File) eingeben
  - c. mit „Enter“ bestätigen
2. Messung im manuellen Modus durchführen.
3. Wenn ein akustischer Alarm ertönt, bitte drücken Sie das „Alarm“ Feld.
4. Ausdruck der Resultate:
  - a. „Sysmex“ Feld wählen
  - b. „Hard Copy“ wählen
  - c. Nachdem die Resultate ausgedruckt wurden, „Return“ wählen