



CSCQ Contrôle de qualité externe pour la détermination des 5 sub-populations de leucocytes

Instructions pour Sysmex XE-5000

Afin d'obtenir un résultat correct des 5 sub-populations de leucocytes, nous vous prions de bien vouloir suivre ces instructions:

1. Réglage sur l'appareil Sysmex XE-5000:
 - a. Choisir „Manual Mode“
 - b. „Sample No“: **QC-123**
 - c. „Mode“: 1: Manual
 - d. „Discrete“: 4: CBC+DIFF+NRBC
 - e. „Enter“
2. Effectuer la mesure en mode manuel.
3. Les résultats seront uniquement mémorisés dans „Explorer“.