

CSCQ Contrôle de qualité externe pour la détermination des 5 sub-populations de leucocytes

Instructions pour Sysmex SF-3000

Afin d'obtenir un résultat correct des 5 sub-populations de leucocytes, nous vous prions de bien vouloir suivre ces instructions:

1. Réglages sur l'appareil Sysmex SF-3000:
2.
 - a. Choisir „Manual Mode“
 - b. Introduire „QC“ et p.ex. „12“ (=fichier libre)
 - c. „Enter“
3. Effectuer les mesures en mode manuel.
4. Si une alarme se met en route, veuillez presser le champ „Alarm“.
5. Impression des résultats:
 - a. Choisir champ „Sysmex“
 - b. Choisir „Hard Copy“
 - c. Après l'impression des résultats, choisir „Return“