



CSCQ Prova annullare per cinque sotto popolazione dei leucociti analisi

Istruzioni per Sysmex SF-3000

La preghiamo di seguire questo manuale per ricevere una precisazione corretta della sotto popolazione dei leucociti:

1. Impostazione per Sysmex SF-3000:
 - a. Scegliere „Manual Mode“
 - b. Digitare „QC“ e per esempio „12“ (= File libero)
 - c. „Enter“
2. Effettuare l'analisi nel modo manuale.
3. Quando suona un allarme, deve annullare „Alarm“ sull'schermo.
4. Stampare i risultati:
 - a. Scegliere „Sysmex“
 - b. Continuare con „Hard Copy“
 - c. Dopo stampa i risultati.
 - d. Scegliere „Return“