



Zur Messung der CO-Oxymetrie-Probe (Hämoglobin und Hämatokrit) auf dem i-STAT und dem i-STAT1.

1. Probe während 15 Minuten auf Zimmertemperatur bringen, bevor die Messung unternommen wird.



2. Nicht auf den Kolben des Röhrchens drücken!



3. Das Röhrchen leicht neigen (Verschluss nach unten) und Probe schwenken; Probe mit Verschluss nach oben drehen und schwenken.



Die Probe ist gebrauchsfertig und während 15 Minuten stabil.

4. Das Kontrollmaterial kurz mischen und in einen Behälter Ihrer Wahl geben (anbei zwei Beispiele), dann die Probe mit einer Pipette aufsaugen und messen.

Wahl 1



Wahl 2



5. Die Probe wie eine Patientenprobe auf Ihrem i-STAT messen.



Hämoglobin- und Hämatokrit-Resultate ins EQAcom-System oder auf das Resultateformular des CSCQ übertragen.