



Suivre les étapes ci-après pour l'utilisation de l'échantillon de CQE pour le dosage de la CO-Oxymétrie sur les appareils i-STAT et i-STAT 1 (Hémoglobine, Hématocrite).

1. Placer l'échantillon à température ambiante pendant 15 minutes avant d'effectuer la mesure.



2. Ne pas appuyer sur le piston de l'échantillon !



3. Incliner doucement le flacon en position bouchon vers le bas et agiter l'échantillon ; remettre en position bouchon vers le haut et agiter.



L'échantillon est prêt-à-l'emploi et stable durant 15 minutes.

4. Transférer le matériel de contrôle dans un contenant de votre choix (deux exemples ci-après) puis prélever et analyser.

Choix 1



Choix 2



5. Mesurer ensuite l'échantillon comme un patient sur votre i-STAT.



Reporter les résultats de l'hémoglobine et de l'hématocrite dans EQAcom ou sur le formulaire de résultats CSCQ.