

AQT90 FLEX – Contrôle de Qualité Externe (CQE)




Avec une pipette, transférer chacun des échantillons dans le tube **intérieur** des «Empty Tube Kit» et les identifier.



L'AQT90 Flex doit être en mode «**Prêt**». L'état de l'analyseur et tous les paramètres doivent être **verts**.

Presser le bouton [Introduire l'échantillon].

Selon l'indication, introduire le tube dans l'analyseur.

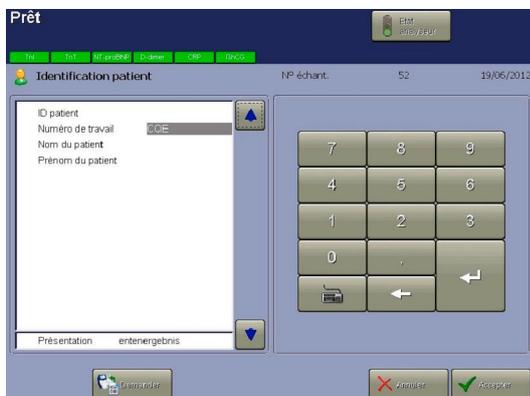

Sous «ID patient» introduire la **désignation du CQE**.

Presser le bouton [Accepter].



Pour le CQE, choisir indifféremment le type de tube : [**CQE**] (si configuré), [**EDTA**] ou [**Li-Héparine**] quels que soient les paramètres.

Sélectionner le(s) paramètre(s) à mesurer

Presser [**Démarrer**].

A la fin de la mesure, le résultat apparaît et est automatiquement imprimé.